

# Hygieneplan für das zahntechnische Labor

## Maßnahmen beim Desinfizieren von mikrobiell kontaminierten Materialien

Zu behandelndes Objekt	Zeitpunkt der hygienischen Maßnahmen	Art der Behandlung	Desinfektionsverfahren	Betroffener Personenkreis
Abformungen aus Elastomeren, Alginaten, Agar oder sonstige Abformungsmaterialien, getragener Zahnersatz	Sofort nach Entnahme aus der Verpackung	Abspülen zur Entfernung grober Verunreinigungen	Fließendes Wasser	Alle Beschäftigten am Desinfektionsarbeitsplatz
		Desinfizieren im Tauchbad	Desinfektionsmittel für Abformungen: Präparat: dd-Abdruckdesinfektion Konzentration: 3% Einwirkzeit: 15 Min.	
Hilfsmittel (z.B. Artikulatoren, Gesichtsbögen, Transportboxen)	Sofort nach Eingang	Sprühdesinfektion	Flächendesinfektionsmittel: Präparat: dd-Flächendesinfektion Konzentration: 7,5% Einwirkzeit: 1 Min.	Alle Beschäftigten am Desinfektionsarbeitsplatz
Arbeits- und Ablageflächen von Desinfektions- und Reinigungseinrichtungen	Sofort nach sichtbarer Verschmutzung	Abwischen mit Desinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit	Desinfektionsmittel für Flächen: Präparat: dd-Flächendesinfektion Konzentration: 7,5% Einwirkzeit: 1 Min.	Alle Beschäftigten am Desinfektionsarbeitsplatz
	Mindestens einmal täglich, bei Arbeitsende	Abwischen mit reinigendem Desinfektionsmittel	Desinfektionsmittel für Flächen: Präparat: dd-Flächendesinfektion Konzentration: 1% Einwirkzeit: 60 min.	